

Configuración de su espacio para el éxito de la CAA



Ya sea en el hogar, en la clínica o en el aula, configurar su entorno de manera reflexiva puede fomentar la comunicación y apoyar el uso exitoso de la CAA. Las siguientes estrategias ayudan a crear un espacio que fomente el uso de la CAA durante las interacciones cotidianas.

Gestión de los dispositivos

- ✓ **Siempre tenga el dispositivo de CAA disponible.** El dispositivo debe acompañar al usuario durante todo el día para aprovechar al máximo las oportunidades de comunicación.
- ✓ **Establezca un lugar designado para el dispositivo.** Cree una estación de carga/almacenamiento consistente donde el dispositivo permanezca durante la noche, con lo que facilita su encontrarlo cada mañana y asegura que esté completamente cargado.
- ✓ **Coloque el dispositivo para acceder a él de la mejor manera posible.** Colóquelo al alcance de la mano en función del método de acceso específico de la persona.

Configuración del entorno

- ✓ **Controle la iluminación de manera reflexiva.** Ajuste la iluminación para evitar un brillo intenso en la pantalla del dispositivo y, al mismo tiempo, reducir la sobreestimulación.
- ✓ **Minimice el desorden visual.** Un entorno visual más tranquilo ayuda a los usuarios a centrarse en la comunicación en lugar de en estímulos incompatibles.
- ✓ **Cree espacio para el movimiento.** ¡La CAA debe ser atractiva y dinámica! Permita un espacio para que los usuarios se muevan e interactúen de forma natural mientras se comunican.

Colocación estratégica de artículos

- ✓ **Cree oportunidades de comunicación.** Mantenga juguetes, bocadillos o actividades muy motivadores en estantes o fuera del alcance directo para fomentar las peticiones.
- ✓ **Use contenedores de forma estratégica.** Guarde los artículos en cajas o contenedores transparentes que requieran ayuda para abrirse, lo que brinda oportunidades naturales para que el usuario pida ayuda.
- ✓ **Agregue apoyos visuales en todo el entorno.** Coloque imágenes o iconos en artículos y ubicaciones relevantes para modelar una comunicación rápida. Por ejemplo, coloque un icono de "ir" en la puerta o un icono de "comer" en el refrigerador para que pueda modelar la comunicación en el momento, incluso si el dispositivo no está disponible de inmediato.



Manténgalo fresco

Cambie de lugar los juguetes y materiales con regularidad. Intercambie juguetes y cambie sus ubicaciones periódicamente para mantener la novedad y el interés sostenido.

AbleNet

QuickTalker Freestyle
LET THE CONVERSATION BEGIN