






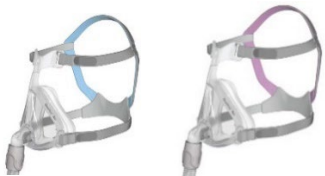

## Alternativen für ResMed Full Face Masken mit Magnetclips<sup>1</sup>

Die folgenden Full Face Masken von ResMed - AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirFit F30 und AirFit F30i - enthalten Magnetclips.




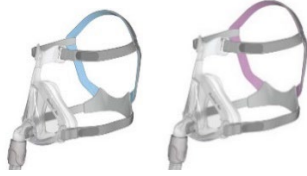

Nach der Aktualisierung der bestehenden Kontraindikationen und Warnhinweise für diese Masken (siehe Sicherheitsinformation, die wir Ihnen zugesandt haben), werden in diesem Dokument alternative Produkte aus dem bestehenden ResMed-Portfolio aufgeführt, damit Sie kontraindizierten Patient:innen einfacher eine Maske ohne Magnetclips empfehlen können.

Diese Informationen sollen Sie bei der Auswahl einer passenden Ersatzmaske für Ihre Patient:innen unterstützen. Bitte führen Sie eine Maskenanpassung durch, um sicherzustellen, dass die Maske richtig passt. Detaillierte Anweisungen und Vorsichtsmassnahmen finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.




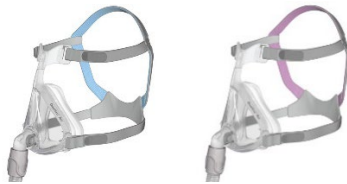

Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte für diese Masken finden Sie in der Liste der Maske / Gerätekompatibilität unter [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks)

	Full Face Maske mit Magnetclips <sup>1</sup> :	Alternative Full Face Masken ohne Magnetclips			
	AirFit™ F20/ AirFit F20 for Her	AirFit F20 Non Magnetic	AirFit F30i Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
<b>Druckbereich</b>	3-40 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Analog- größen</b>	AirFit F20 SML	AirFit F20 Non Magnetic SML		Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F20 MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F20 LGE	AirFit F20 Non Magnetic LGE	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
	AirFit F20 for Her SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML
	AirFit F20 for Her MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED
<b>Artikel-Nr. für Masken- systeme</b>	63405-AirFit F20 SML Sys - EU1 63406-AirFit F20 MED Sys - EU1 63407-AirFit F20 LGE Sys - EU1 63408-AirFit F20 for Her SML - EU1 63409-AirFit F20 for Her MED - EU1 64005-AirFit F20 SML Sys Quiet- EU1 64006-AirFit F20 MED Sys Quiet- EU1 64007-AirFit F20 LGE Sys Quiet- EU1 64008-AirFit F20 for Her SML Quiet- EU1 64009-AirFit F20 for Her MED Quiet- EU1	64031-AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032-AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033-AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	63341- AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63343- AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344- AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU	62705-Quattro Air FFM SML-EUR1 62706-Quattro Air FFM MED-EUR1 62707-Quattro Air FFM LGE-EUR1 62743-Quattro Air FFM for Her XSML-EUR1 62744-Quattro Air FFM for Her SML- EUR1 62745-Quattro Air FFM for Her MED-EUR1	61204-Mirage Quattro FFM XSML- EUR1 61205-Mirage Quattro FFM SML- EUR1 61206-Mirage Quattro FFM MED- EUR1 61207-Mirage Quattro FFM LGE- EUR1

Hinweis: Andere Maskentypen ohne Magnetclips sind die Nasenmasken Mirage™ FX, AirFit N30i, AirFit N30 und die Nasenpolstermasken AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX. Bitte besuchen Sie ResMed.com für weitere Informationen zu diesen Masken.

	Full Face Maske mit Magnetclips <sup>1</sup> :	Alternative Full Face Masken ohne Magnetclips:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
<b>Druckbereich</b>	3-30 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Analoggrößen</b>	AirFit F30 SML		AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED/ AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
<b>Artikel-Nr. für Maskensysteme</b>	<b>64110</b> -AirFit F30 SML Sys - EU <b>64111</b> -AirFit F30 MED Sys – EU	<b>63341</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU <b>63343</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU <b>63344</b> - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU	<b>64031</b> -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032</b> -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033</b> -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	<b>62705</b> -Quattro Air FFM SML-EUR1 <b>62706</b> -Quattro Air FFM MED-EUR1 <b>62707</b> -Quattro Air FFM LGE-EUR1 <b>62743</b> -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR1 <b>62744</b> -Quattro Air FFM for Her SML-EUR1 <b>62745</b> -Quattro Air FFM for Her MED-EUR1	<b>61204</b> -Mirage Quattro FFM XSML-EUR1 <b>61205</b> -Mirage Quattro FFM SML-EUR1 <b>61206</b> -Mirage Quattro FFM MED-EUR1 <b>61207</b> -Mirage Quattro FFM LGE-EUR1

Hinweis: Andere Maskentypen ohne Magnetclips sind die Nasenmasken Mirage™ FX, AirFit N30i, AirFit N30 und die Nasenpolstermasken AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX. Bitte besuchen Sie ResMed.com für weitere Informationen zu diesen Masken.

	Full Face Maske mit Magnetclips <sup>1</sup> :	Alternative Full Face Masken ohne Magnetclips:			
	AirFit™ F30i	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
<b>Druckbereich</b>	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-30 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	3-40 cmH <sub>2</sub> O	4-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Analoggrößen</b>	AirFit F30i S/SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD		AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE		AirFit F20 Non Magnetic MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
<b>Artikel-Nr. für Maskensysteme</b>	<b>63310</b> -AirFit F30i SYS - S/SML - EU <b>63312</b> -AirFit F30i SYS - M/STD - EU <b>63313</b> -AirFit F30i SYS - W/STD - EU	<b>63341</b> - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU <b>63343</b> - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU <b>63344</b> - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU	<b>64031</b> -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU <b>64032</b> -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU <b>64033</b> -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	<b>62705</b> -Quattro Air FFM SML-EUR1 <b>62706</b> -Quattro Air FFM MED-EUR1 <b>62707</b> -Quattro Air FFM LGE-EUR1 <b>62743</b> -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR1 <b>62744</b> -Quattro Air FFM for Her SML-EUR1 <b>62745</b> -Quattro Air FFM for Her MED-EUR1	<b>61204</b> -Mirage Quattro FFM XSML-EUR1 <b>61205</b> -Mirage Quattro FFM SML-EUR1 <b>61206</b> -Mirage Quattro FFM MED-EUR1 <b>61207</b> -Mirage Quattro FFM LGE-EUR1

Hinweis: Andere Maskentypen ohne Magnetclips sind die Nasenmasken Mirage™ FX, AirFit N30i, AirFit N30 und die Nasenpolstermasken AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX. Bitte besuchen Sie ResMed.com für weitere Informationen zu diesen Masken.



Dieser Inhalt ist nur für den Fachhandel & medizinisches Fachpersonal bestimmt. Relevante Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmassnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.

1. Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Sie dürfen von Patient:innen mit aktiven medizinischen Implantaten, die mit Magneten interagieren, und/oder metallischen Implantaten/Gegenständen, die ferromagnetisches Material enthalten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch für andere Personen, die in engen körperlichen Kontakt mit einem/einer Maskenträger:in kommen. Halten Sie die Magnete der Maske in einem Sicherheitsabstand von mindestens 150 mm zu Implantaten oder medizinischen Geräten, die durch magnetische Interferenzen negativ beeinflusst werden könnten. Ausführliche Informationen, einschliesslich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

AirFit, Mirage, Mirage Quattro, Quattro und Swift sind registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.  
© 2023 ResMed. 10113748/4-CH-DE 2024-02







## Alternativen für ResMed-Nasenmasken mit Magnetclips<sup>1</sup>

Die folgenden ResMed-Nasenmasken - AirFit™ N20, AirFit N20 for Her - enthalten Magnetclips.

Nach der Aktualisierung der bestehenden Kontraindikationen und Warnhinweise für diese Masken (siehe Sicherheitsinformation, die wir Ihnen zugesandt haben), werden in diesem Dokument Produktalternativen aus dem bestehenden ResMed-Portfolio aufgeführt, damit Sie kontraindizierten Patient:innen einfacher eine Maske ohne Magnetclips empfehlen können.

Diese Informationen sollen Sie bei der Auswahl einer passenden Ersatzmaske für Ihre Patient:innen unterstützen. Bitte führen Sie eine Maskenanpassung durch, um sicherzustellen, dass die Maske richtig passt. Detaillierte Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.

Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte für diese Masken finden Sie in der Liste der Maske / Gerätekompatibilität unter [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

	Nasenmaske mit Magnetclips <sup>1</sup> :	Alternative Nasenmasken ohne Magnetclips:		
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30i	AirFit N30
				
<b>Druckbereich</b>	4-30 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O	4-25 cmH <sub>2</sub> O	4-20 cmH <sub>2</sub> O
<b>Analoggrößen</b>	AirFit N20 MED	Mirage FX Standard	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 <sup>2</sup>
	AirFit N20 LGE	Mirage FX Wide	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N20 for Her SML	Mirage FX for Her	AirFit N30i S/SML	
<b>Artikel-Nr. für Maskensysteme</b>	63511-AirFit N20 MED Sys - EU1 63512-AirFit N20 LGE Sys - EU1 63510-AirFit N20 SML (for Her) - EU1	62100-Mirage FX Mask Sys-EUR1 62115-Mirage FX Mask Sys WD-EUR1 62132-Mirage FX for Her Mask Sys - EUR1	63817-AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63819-AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63880-AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63882-AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU	64204-AirFit N30 Mask SYS EU 64205-AirFit N30 Mask SYS

*Hinweis: Zu den Nasenpolstermasken ohne Magnetclips gehören AirFit P10, AirFit P30i und Swift FX. Zu den Full Face Masken ohne Magnetclips gehören Quattro Air und Mirage Quattro. Weitere Informationen zu diesen Masken finden Sie auf ResMed.com.*



Dieser Inhalt ist nur für den Fachhandel & medizinisches Fachpersonal bestimmt. Relevante Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmassnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.

1. Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Sie dürfen von Patient:innen mit aktiven medizinischen Implantaten, die mit Magneten interagieren, und/oder metallischen Implantaten/Gegenständen, die ferromagnetisches Material enthalten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch für andere Personen, die in engen körperlichen Kontakt mit einem/einer Maskenträger:in kommen. Halten Sie die Magnete der Maske in einem Sicherheitsabstand von mindestens 150 mm zu Implantaten oder medizinischen Geräten, die durch magnetische Interferenzen negativ beeinflusst werden könnten. Ausführliche Informationen, einschließlich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.
2. AirFit N30 wird mit den Maskenkissen S und M geliefert.

AirFit, Mirage und Swift sind registrierte Marken der ResMed Unternehmensgruppe. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.  
© 2023 ResMed. 10113747/3-CH-DE 2023-10







## Alternativen für Non-Vented ResMed-Masken mit Magnetclips<sup>1</sup>

Die AirFit™ F20 NV Full Face Maske von ResMed enthält Magnetclips.

Nach der Aktualisierung der bestehenden Kontraindikationen und Warnhinweise für diese Maske (siehe Sicherheitsinformation, die wir Ihnen zugesandt haben), wird in diesem Dokument eine Produktalternative aus dem bestehenden ResMed-Portfolio aufgeführt, damit Sie kontraindizierten Patient:innen einfacher eine Maske ohne Magnetclips empfehlen können.

Diese Informationen sollen Sie bei der Auswahl einer passenden Ersatzmaske für Ihre Patient:innen unterstützen. Bitte führen Sie eine Maskenanpassung durch, um sicherzustellen, dass die Maske richtig passt. Detaillierte Anweisungen und Vorsichtsmassnahmen finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.

Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte für diese Masken finden Sie in der Liste der Maske / Gerätekompatibilität unter [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

	NV Full Face Maske mit Magnetclips <sup>1</sup> :	Alternative NV Full Face Maske ohne Magnetclips:
	AirFit™ F20 NV	Quattro™ Air NV
		
<b>Druckbereich</b>	3-40 cmH <sub>2</sub> O	0-40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Analoggrößen</b>	AirFit F20 NV SML	NV Quattro Air FFM SML
	AirFit F20 NV MED	NV Quattro Air FFM MED
	AirFit F20 NV LGE	NV Quattro Air FFM LGE
<b>Artikel-Nr. für Maskensysteme</b>	<b>64020</b> -AIRFIT F20 NV SML SYS ROW <b>64021</b> -AIRFIT F20 NV MED SYS ROW <b>64022</b> -AIRFIT F20 NV LGE SYS ROW	<b>62782</b> -NV Quattro Air FFM XSML - EUR <b>62783</b> -NV Quattro Air FFM SML - EUR <b>62784</b> -NV Quattro Air FFM MED - EUR <b>62785</b> -NV Quattro Air FFM LGE - EUR

Dieser Inhalt ist nur für den Fachhandel & medizinisches Fachpersonal bestimmt. Relevante Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in den Gebrauchsanweisungen.

1. Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Sie dürfen von Patient:innen mit aktiven medizinischen Implantaten, die mit Magneten interagieren, und/oder metallischen Implantaten/Gegenständen, die ferromagnetisches Material enthalten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch für andere Personen, die in engen körperlichen Kontakt mit einem/einer Maskenträger:in kommen. Halten Sie die Magnete der Maske in einem Sicherheitsabstand von mindestens 150 mm zu Implantaten oder medizinischen Geräten, die durch magnetische Interferenzen negativ beeinflusst werden könnten. Ausführliche Informationen, einschliesslich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.