



Endoscopia Transnasal Sin Sedación (TNE) con el Sistema de Endoscopia EvoEndo



¿Qué sucederá?


Este procedimiento lo realiza un profesional de la salud para evaluar el sistema digestivo superior.



Se aplicará un anestésico en las fosas nasales para adormecer la nariz y la parte posterior de la garganta.



Es posible que reciba un Kit de Experiencia del Paciente de EvoEndo con elementos diseñados para distraerse durante el procedimiento.

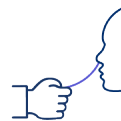

El endoscopio EvoEndo se introduce por la nariz para que el médico pueda examinar la garganta, el estómago e incluso parte del intestino delgado.



Si es necesario, se pueden tomar muestras pequeñas de tejido, llamadas biopsias, mediante el endoscopio EvoEndo con unas pinzas o cepillos especiales. También se puede utilizar aire y agua para que el médico vea mejor.

Escanee el código QR para ver el procedimiento y obtener más información sobre qué esperar.



¿Qué es Endoscopia Transnasal Sin Sedación EvoEndo (TNE)?

Un Método Revolucionario

Endoscopia Transnasal Sin Sedación EvoEndo (TNE) es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para examinar el sistema digestivo superior sin tener que dormir al paciente.

El endoscopio EvoEndo es estrecho y flexible, lo que le permite que su médico observe el sistema digestivo a través de la nariz en lugar de la boca.

TNE Sin Sedación elimina las posibles complicaciones y molestias asociadas con la anestesia general.



98%
Índice
de Éxito*



Menor Riesgo

Este procedimiento se realiza con el paciente despierto, por lo que no hay ninguno de los riesgos derivados de la anestesia. El endoscopio EvoEndo es desechable y de un solo uso, lo que elimina el riesgo de contaminación.



Sin Anestesia



**Sin Aguja ni
Vías Intravenosas**

* Nguyen N, et al. Transnasal Endoscopy in Unsedated Children With Eosinophilic Esophagitis Using Virtual Reality Video Goggles. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Nov;17(12):2455-2462.

Lo Que Dicen Los Pacientes

“ *Mi experiencia con la endoscopia transnasal ha sido muy positiva. Lo mejor fue que recibí los resultados muy rápido, lo que nos ayudó a mí y a mi familia a decidir los pasos siguientes y pude regresar más rápido a mi rutina diaria de práctica y estudios.*”

— Makenzie, Paciente Pediátrica

“ *Lleva mucho menos tiempo y es mucho más fácil de realizar que las endoscopias normales con anestesia general.*”

— Colin P., Paciente Pediátrico



“ *Esto es mucho mejor que una anestesia general con mal olor y despertar de mal humor o cansada.*”

— Eliana, Paciente Pediátrica

Escanee el código QR o visite evoendopatient.com para obtener más información.



We do it for the kids.

A Better Experience

In most cases, less fasting time is required on procedure day. EvoEndo Sedation-Free TNE usually lasts about 1 hour, and because there is no recovery from anesthesia, you can return to daily activities more quickly.

Spend less time in the procedure room and more time enjoying the things you love!

“ *The ability to perform unsedated transnasal endoscopy in our patients with EoE is transformational. Among my favorite benefits is the parents' ability to be in the room during the procedure to see what I am seeing in real time and support their child. Sharing this journey toward healing is one of the greatest joys in medicine.*”

— Nick CaJacob, Pediatric MD

Preguntas Frecuentes

¿Es segura?

TNE es segura y los estudios muestran que el 98 % de los pacientes mayores de 5 años toleran este procedimiento.*

¿Cuáles son los riesgos?

Los efectos secundarios más comunes de este procedimiento son dolor de nariz o garganta, sangrado o irritación leve, molestias leves en el pecho o el estómago, presión o náuseas o regurgitación breves. Estos efectos se han documentado en el 2 % al 5 % de los casos.*

Para obtener una lista más detallada de los riesgos posibles de cualquier tipo de endoscopia, consulte a su médico antes de someterse a este procedimiento.

¿Cuánto tiempo tarda?

Su cita de TNE sin sedación durará aproximadamente una hora. Después podrá regresar al trabajo o a su casa según las indicaciones del médico.

¿Puedo comer o beber antes?

Siempre es mejor hablar con un profesional de la salud sobre las instrucciones específicas de preparación, pero se recomienda no comer ni beber nada durante 2 a 4 horas antes del procedimiento.



Pequeños endoscopios, enormes logros.

Nuestra tecnología ultradelgada hace posible la endoscopia sin sedación para mejorar la vida de los pacientes, las familias y los profesionales de la salud.

CORREO
ELECTRÓNICO

info@evoendo.com

 evoendo

TELÉFONO 303.223.7445

 evoendoinc

WEB evoendopatient.com

 evoendo

 **evoendo**[®]
Endoscopia Evolucionada